
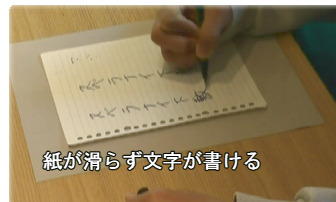


スベラナイト®

～片手でも字が書ける滑り止めシート～

滑り止めシートの特徴

☆片手でも字が書ける ☆うすい ☆はさみで切れる ☆洗える ☆熱に強い ☆ミシン縫い可能

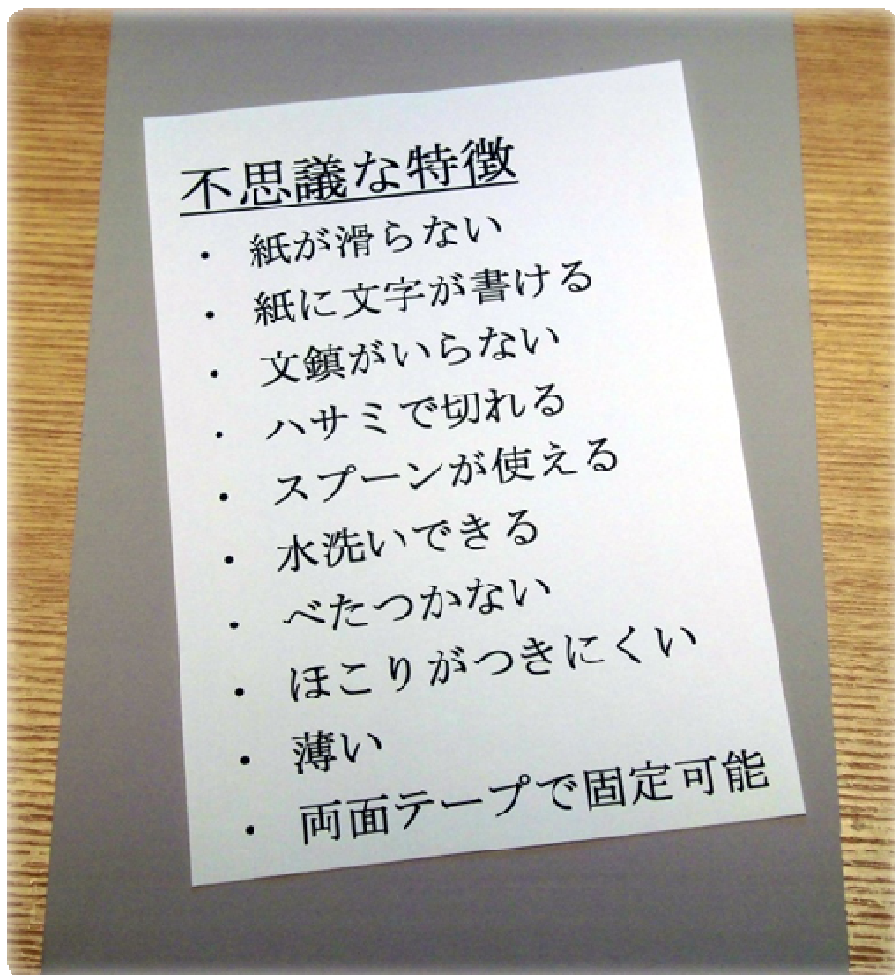

兵庫県脳卒中者友の会 あげぼの会 推薦のことば

紙を押えなくても字が書ける驚き、片手でアイスクリームが食べられた喜びを伝えたい。ランチョンマット代わりに使用すると人目を気にせずに片手で食べられることを知ってほしい。スベラナイトことが生活の向上・創作意欲につながることを多くの方に伝えたい。だから、あげぼの会は「スベラナイト」を推薦します。

使用上の注意

- ・火に近づけない・消しゴムなどでこすらない(表面のコーティングが剥がれ、すべり止め効果がなくなります。)
- ・折り曲げると折り目が付きます。ホコリや汚れが付着した場合
- ・スポンジたわしで簡単に水洗いができます。・洗濯機の弱洗濯で洗えます。・コロコロ(粘着クリーナー)で表面のホコリがとれます。

販売価格：B3-56 (34cm×56cm) 2,000円 (1枚入り・税抜き)
A4-20 (20cm×29cm) 1,500円 (2枚入り・税抜き)

問い合わせ先

(株) 甲南医療器研究所 神戸市長田区荻藻通2-7-6
TEL 078-651-3819 E-mail: info@suberanaito.com
動画 <http://katateami.com/suberanaito>

スベラナイト使用上の注意事項

- 特徴 1. 厚みが約 0.3mm と薄く、優れた滑り止め効果があります。
2. イソプロピルアルコール、次亜塩素酸ナトリウム、塩酸、硫酸など耐薬品性に優れています。
3. 熱に強い滑り止めシート（耐熱 100 度）
- 用途 ・ 金属、非金属など多くのものに優れた滑り止め効果があります。
・ 日常生活、リハビリ、看護現場、実験室での滑り止め使用。
- 使い方 ・ 色々なところに敷くだけで使用できます。
・ 下敷きとして使うと紙が滑らず片手で字が書けます。
・ 必要なサイズ・形状にハサミで簡単に切れます。
・ 両面テープで色々なところに貼れます。
- 注意点 ・ 手術室等では使用しないでください。
・ 火には近づけないでください。
・ 消しゴムなどでこすらないでください。
・ 煮沸消毒や滅菌処理して使用しないでください。
・ 折り曲げると折れ目が付きますので注意してください。
- ホコリや汚れが付着した場合
・ スポンジたわしで簡単に水洗いができます。
・ 粘着クリーナーで表面のホコリがとれます。
・ 洗濯機の弱洗濯で洗えます。



専門家も認める使いやすさ

高齢者や手の不自由な方が日常生活を快適に過ごせる商品として、福祉・介護・医療の専門家が審査し、**全国 30 の福祉機器常設展示場で展示されています。** 病院・老人福祉施設・デイサービスなど医療・介護現場をはじめ、個人の方が使用しています。

～スベラナイトを展示している全国 30 の福祉機器常設展示場～

- 岩手県 (公財) いきいき岩手支援財団 岩手県高齢者総合支援センター
宮城県 宮城県介護研修センター
秋田県 秋田県高齢者総合相談・生活支援センター
福島県 福島県介護実習・普及センター 福祉機器展示室
新潟県 福祉機器展示・体験コーナー いきいき生活応援館・ユニソンプラザ店
山梨県 山梨県立介護実習普及センター
埼玉県 福) 埼玉県社会福祉協議会 介護すまいる館
東京都 シルバープラザ梅若 福祉機器展示室
板橋区おとしより保健福祉センター
神奈川県 横浜市総合リハビリテーションセンター (分室) 反町福祉機器支援センター
横浜市総合リハビリテーションセンター (分室) 中山福祉機器支援センター
横浜市総合リハビリテーションセンター (分室) 泥亀福祉機器支援センター
愛知県 なごや福祉用具プラザ
富山県 富山県介護実習・普及センター
石川県 金沢福祉用具情報プラザ
福井県 (福) 福井県社会福祉協議会 福井県介護実習・普及センター
滋賀県 滋賀県福祉用具センター
兵庫県 福祉のまちづくり研究所 家庭介護・リハビリ研修センター／福祉用具展示ホール
兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンター 福祉用具展示ホール(コム・プラザ)
奈良県 奈良県立福祉住宅体験館 (奈良県介護実習・普及センター)
香川県 福祉用具展示場「なんでも館」
福岡県 北九州市立介護実習・普及センター 福祉用具プラザ北九州
福岡県介護実習・普及センター 福祉用具展示室
福岡市介護実習普及センター
佐賀県 佐賀県在宅生活サポートセンター
大分県 大分県社会福祉介護研修センター 福祉用具展示場
宮崎県 宮崎県高齢者総合支援センター 福祉用具展示場
鹿児島県 福祉機器展示相談センター
沖縄県 沖縄県介護実習・普及センター福祉機器展示コーナー

スベラナイトは (株) 甲南医療器研究所の登録商標です。

平成 30 年 4 月現在。

販売

株式会社甲南医療器研究所

〒653-0032 兵庫県神戸市長田区苅藻通 2-7-6

TEL 078-651-3819

<http://www.suberanaito.com/>

E-mail: info@suberanaito.com

お問合せ