

飲み込みラクラク お助け枕

ふたこぶ ラックン

監修

社会医療法人健和会健和会病院
健和会総合リハビリテーションセンター長

ふくむら なおき
福村 直毅

福むら式 えんげ 嚥下対応枕

誤嚥しにくい完全側臥位に適した枕
意匠出願 2016-16580
新規実用新案出願 2016-4545



日本人の死因第3位は肺炎です。
その多くは誤嚥性肺炎によるものです。
細菌が唾液や胃液と共に肺に流れ込んで生じる肺炎です。
誤嚥しにくい完全側臥位に適した枕を福村医師と共に開発しました。



ふたつのこぶが頭部を固定します。



自立した経口摂取がしやすい設計になっています。

ラクラク
ですね!



ふたこぶ ラックン

取り扱い方法



1



クリップを手前に折り、開きます。

2



クリップを閉じ、備え付けのタオルを取り付けます。

3



裏返します。

4



タオルを小さい方のこぶの下に巻き込んで包みます。

5



ご利用の枕の上に置いて使用してください。



ふたつのこぶの間は調整できます。

⚠ 使用上の注意

●火気に近づけないでください。●長時間汗や水にぬれたり、浸けたままにしますと他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。●洗濯の際、色落ちすることがありますので他のもののお洗濯はお避けください。●洗濯の際、漂白剤のご使用はお避けください。●本来の用途以外には使用しないでください。●枕本体はカバーを外し、カバーのみお洗濯をしてください。●④の写真のように、タオルを枕本体に巻き込むことで、枕の形状が頭にフィットします。

品質表示

枕カバー：ポリエステル100%
タオル：ポリエステル85%、
ナイロン15%

洗濯方法

枕カバー：
タオル：



ふくむら なおき
福村 直毅

1998年 山形大学卒業
同大学脳神経外科入局
2001年 庄内医療生協
2002年 長町病院リハビリテーション科
坂総合病院リハビリテーション科
2003年 聖隷三方原病院リハビリテーション科
秋田県立リハビリテーション・
精神医療センターリハビリテーション科
2004年 鶴岡協立リハビリテーション病院
リハビリテーション科、科長
2011年 同、部長
2015年 社会医療法人健和会健和会病院
健和会総合リハビリテーションセンター長



ふくむら ひろこ
福村 弘子

2003年 聖隷三方原病院 摂食嚥下障害研修
2004年 庄内医療生協 鶴岡協立リハビリテーション病院
2006年 医学書院 看護学雑誌 論文掲載
2008年 日本摂食嚥下リハビリテーション学会
嚥下認定士取得
2010年 山形摂食嚥下研究会世話人
2015年 社会医療法人健和会健和会病院 入職
2015年 日本赤十字広島看護大学ヒューマン・
ケアリングセンター認定看護師教育課程
「摂食嚥下障害看護」研修
2016年 摂食嚥下障害看護認定看護師 認定